

**2015 年 10 月改訂（第 4 版）（新記載要領に基づく改訂）

*2010 年 9 月改訂（第 3 版）

届出番号: 13B2X00023000042

一般医療機器 医 04 整形用品 13700000 医療ガーゼ

ハクジュウジYガーゼ滅菌済

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

綿 100%ガーゼを折り畳んだ後に、切り込みを入れ滅菌したもの

【使用目的又は効果】

**外科切開口、他の皮膚損傷又は内部構造に対し、出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染から器官の保護を目的とするガーゼ

【使用方法等】

本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、1 回限り使用する

【使用上の注意】

一度開封したものは、滅菌状態が保てないため、開封後は全量を消費すること

*裁断部より乱糸が出るので、体内や器具などへの落下に注意すること

【保管方法及び有効期間等】

**1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

**2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

**<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910 （休日・夜間 TEL 03-3987-6111）