

\*\*2015年8月改訂（第4版）（新記載要領に基づく改訂）

\*2006年10月改訂（第3版）

届出番号: 13B2X00023000049

一般医療機器 医04 整形用品 13700000 医療ガーゼ

# ハクジュウジコメガーゼ滅菌済

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

体内に留置しないこと

## 【形状・構造及び原理等】

綿100%の平織りガーゼ

\*本品は幅によりタイプが異なるのでパッケージに規格を記載

## 【使用目的又は効果】

\*\*外科切開口、他の皮膚損傷又は内部構造に対し、出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染から器官の保護を目的とするガーゼ

## 【使用方法等】

本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、1回限り使用する

## 【使用上の注意】

包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は滅菌品として使用しないこと

一度開封したものは、滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること

## 【保管方法及び有効期間等】

### \*\*1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

小児の手の届かないところに保管すること

### \*\*2. 有効期間

\*\*本品の使用期限は包装に記載 [自己認証（自社データ）による]

## 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

\*\*<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ (お客様相談室) TEL 0120-01-8910 (休日・夜間 TEL 03-3987-6111)