

**2016年8月改訂（第3版）（新記載要領に基づく改訂）

*2005年8月改訂（第2版）

*届出番号：13B2X00023000050

一般医療機器 医04 整形用品 32374000 X線造影材入りガーゼ

ハクジュウジコメガーゼXP滅菌済

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

*綿100%の平織りガーゼの縦糸に、X線造影材を1本以上織り込んだもの。

*X線造影材：硫酸バリウムを含有したポリプロピレン繊維の数十本を収束し、ポリエステルでラセン状にラッピングし糸状としたもの。
(わかりやすいように有色としてある)

【使用目的又は効果】

*出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルローズ製の薬品を含まない吸収材料をいう。X線で検知できる成分を用いている。

【使用方法等】

本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、1回限り使用すること。

**本品は再滅菌しないこと。

**一度開封したものは、滅菌状態が保てないため、開封後は全量を消費すること。

**患者の体内への遺残を防止するため、手術前に使用する本品の数を確認し、手術終了時の縫合前にも必ず再度本品の数を確認すること。

**縫合前にはレントゲン写真の撮影を行い、術野の造影材像を確かめガーゼの遺残がないことを確認すること。もし数量が合わないようであれば、レントゲン写真を撮影角度を変えるなどして複数枚撮影し、造影材像を確認すること。

【使用上の注意】

**1. 併用医療機器

*ごくまれに電気メス等の使用により引火することがある。

**2. 使用方法

**体内に留置しないこと。[使い捨て医療機器のため]

**X線造影材に強い負荷がかからないように使用すること。[X線造影材を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存するおそれがあるため]

【保管方法及び有効期間等】

**1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

**2. 有効期間

**本品の使用期限は包装に記載。[自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

**<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）