

**2015 年 7 月改訂（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）

*2005 年 7 月改訂（第 2 版）

届出番号: 13B2X00023000051

一般医療機器 医 04 整形用品 11028000 コットンボール

白十字糸付綿球滅菌済

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

脱脂綿（綿 100%）を球状に丸めて糸（綿 100%）をつけたものを滅菌した製品

【使用目的又は効果】

**球状の綿繊維から成り、医薬品の塗布や、患者の体表から少量の体液を吸収する等を目的とする

【使用方法等】

本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、1 回限り使用する

【使用上の注意】

**本品及び脱落繊維を体内に残らないように使用すること

本品の糸を強く引っ張ると、綿球から糸が抜けるおそれがある

包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は滅菌品として使用しないこと

一度開封したものは、滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること

*綿の表面や内部に黄色又は黒色の斑点状のものがみつかることがあるが綿の実殻であるため使用上に支障はない

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

**本品の使用期限は包装に記載 [自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

**<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910 （休日・夜間 TEL 03-3987-6111）