

**2015年4月改訂（第3版）（新記載要領に基づく改訂）

*2005年7月改訂（第2版）

届出番号: 13B2X00023000074

一般医療機器 医 04 整形用品 11028000 コットンボール

ノイロボール

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

脱脂綿（綿100%）を球状に丸めてガーゼで包み込み、糸（綿100%）で結んだ球状のもの

【使用目的又は効果】

**球状の綿繊維から成り、医薬品の塗布や、患者の体表から少量の体液を吸収する等を目的とする

【使用方法等】

衛生材料として適宜滅菌して使用すること

【使用上の注意】

体内に残らないように使用すること

*ガーゼをほどいて使用しないこと

包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は使用しないこと

開封後は早めに使用すること

滅菌して使用する場合は再滅菌しないこと

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

小児の手の届かないところに保管すること

**本品の使用期限は包装に記載 [自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

**<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）