

**2015年4月改訂（第5版）（新記載要領による改訂）

*2007年9月改訂（第4版）

届出番号：13B2X00023000077

一般医療機器 医04 整形用品 11028000 コットンボール

滅菌シルキー綿球

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

脱脂綿（綿100%）を球状に丸め、フィブリル化セルロース繊維を表面コーティングし、リントの発生を防止した製品

【使用目的又は効果】

**球状の綿繊維から成り、医薬品の塗布や、患者の体表から少量の体液を吸収する等を目的とする

【使用方法等】

本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、1回限り使用する

【使用上の注意】

繊維が患部に残らないように注意すること

包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は滅菌品として使用しないこと

一度開封したものは、滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること

綿の表面や内部に黄色又は黒色の斑点状のものがみつかることがあるが綿の実殻であるため使用上に支障はない

電子線滅菌の場合、脱脂綿主成分のセルロースが酸化し綿球が若干黄変することがあるが人体に影響はない¹⁾

10%、5%ハイポアルコールを含浸させると綿球が電子線滅菌により酸化することによって、添加物（炭酸ナトリウム）と反応し黄色に発光するが人体には影響はない¹⁾

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

小児の手の届かないところに保管すること

**本品の使用期限は包装に記載 [自己認証（自社データ）による]

【主要文献及び文献請求先】

- 1) 中材業務&滅菌技法「電子線滅菌による素材への影響：電子線滅菌した綿球の含浸によるハイポアルコールの黄変—その原因と安全性」NO.98（2003.9）

白十字株式会社 TEL 0120-01-8910

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

**<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ (お客様相談室) TEL 0120-01-8910

(休日・夜間 TEL 03-3987-6111)