

*2015 年 12 月改訂（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）

2005 年 7 月作成（新様式第 1 版）

届出番号：13B2X00023000088

一般医療機器 医 04 整形用品 34655000 医療用不織布

ニューディスポガーゼ滅菌済

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

セルロース繊維（Lyocell）を水流により絡め布状にして滅菌したもの。

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、1 回限り使用する。

【使用上の注意】

*繊維が患部に残らないように注意すること。

一度開封したものは、滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること。

【保管方法及び有効期間等】

*1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

*2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載 〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

*<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910 （休日・夜間 TEL 03-3987-6111）