

**2026年6月改訂（第4版）

*2016年8月改訂（第3版）（新記載要綱に基づく改訂）

届出番号：13B2X00023000106

一般医療機器 医 04 整形用品 35531000 単回使用汎用サージカルドレープ

手術・処置用不織布覆布

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

不織布及び不織布・ポリエチレンフィルムの貼り合せ品。（穴及び穴ずれ防止の粘着テープ貼り合せによって種類は異なる）

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。

本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。

本品は単回使用である。

【使用方法等】

**1. 使用方法

- ①滅菌包装を開封し、無菌的に取り出す。
- ②消毒した手術部周辺を覆う。

**2. 使用方法等に関連する使用上の注意

- * 本品は再滅菌しないこと。
- * 一度開封したものは直ちに使用すること。

[滅菌状態が保てないため]

【使用上の注意】

**1. 重要な基本的注意

- * ごくまれに電気メス等の使用により引火することがある。

**・粘着テープを使用している製品について、粘着剤によるか

ぶれ等の皮膚障害や、アレルギー症状を生じる恐れがある。

患者の皮膚に異常が認められた場合は、直ちに使用を中止し、

適切な処置を施すこと。

**・消毒用アルコール等の可燃性消毒薬を使用した場合は、消毒後アルコール等を拭き取り、又は気化拡散していることを確認してから使用すること。[引火による火災の恐れがあるため]

【保管方法及び有効期間等】

*1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

*2. 有効期間

*本品の使用期限は包装に記載

[自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

**<https://www.hakujuji.co.jp>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910

（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）