

一般医療機器 医04 整形用品 34864000 救急絆創膏

白十字救急絆

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

*パッド：不織布、ポリエチレン

粘着テープ：塩化ビニル、アクリル系粘着剤

【使用目的又は効果】

傷口の被覆及び保護。

【使用方法等】

*傷口を清潔にしてパッド部を傷口に当て、粘着テープで固定して使用してください。

【使用上の注意】

①傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。

水気があるときにくい場合があります。

*②皮膚の弱い方は同じところに繰り返し貼らずに、1日1～2回粘着面の位置を変えてください。

③パッド部分が濡れたり、汚れたりしたままにしておくと傷の治りがわるくなる場合がありますので、貼り変えてください。

*④粘着面を患部に貼らないでください。

⑤小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとにご使用ください。

⑥本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等があらわれた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

*⑦救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意してご使用ください。

*⑧滅菌効果が損なわれますので、テープは使用時に開封してください。

【保管方法及び有効期間等】

*1. 保管方法

小児の手の届かない所に保管してください。

直射日光を避け、清潔な所に保管してください。

滅菌効果が損なわれますので、使用時に開封してください。

*2. 有効期間

*本品の使用期限は包装に記載 [自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

*<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室）TEL：0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）