

\*\*2016年3月改訂（第3版）（新記載要領に基づく改訂）

\*2006年12月改訂（第2版）

届出番号：13B2X00023000113

一般医療機器 医04 整形用品 34864000 救急絆創膏

# フリーサイズ絆

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】

パッド : ガーゼ (37mm×250mm)

粘着テープ : 塩化ビニル、アクリル系粘着剤

## 【使用目的又は効果】

傷口の被覆及び保護。

## 【使用方法等】

- ①本品を傷の長さより約3cmほど長く切る。
- ②傷口を水道水等で汚れや異物を完全に除去する。
- ③滅菌ガーゼ等で傷口とその周囲の水気を良く拭き取る。
- ④本品の剥離紙を剥がす。
- ⑤パッド部分の中心に傷口がくるよう本品を貼る。

## 【使用上の注意】

傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。

水気があるとつきにくい場合があります。

粘着面を患部に貼らないでください。

\*\*救急絆創膏にかぶれやすい方は使用に際して注意して使用してください。

\*\*使用中、かゆみ・痛み等のかぶれの症状があらわれた場合には使用を中止して医師又は薬剤師に相談してください。

\*\*皮膚の弱い方は同じところに繰り返し貼らずに少しずつらして使用してください。

パッド部分が濡れたり、汚れたりしたままにしておくと傷の治りが悪くなる場合がありますので、1日1～2回貼り替えるようにしてください。

小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとにご使用ください。

## 【保管方法及び有効期間等】

### \*\*1. 保管方法

小児の手の届かない所に保管してください。

直射日光を避け、清潔な所に保管してください。

### \*\*2. 有効期間

\*\*本品の使用期限は包装に記載 [自己認証（自社データ）による]

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

\*\*<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室）TEL：0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）