

一般医療機器 医 04 整形用品 34864000 救急絆創膏

白十字注射用保護パッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

*パッド：レーヨン不織布

粘着テープ：レーヨン・合成繊維、アクリル系粘着剤

【使用目的又は効果】

傷口の被覆及び保護。

【使用方法等】

創傷面とそのまわりを清潔にし、パッドの部をあててテープで固定して使用してください。

【使用上の注意】

キズロとそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。

水気があるとつきにくい場合があります。

救急絆創膏にかぶれやすい方は使用に際して注意して使用してください。

使用中、かゆみ・痛み等のかぶれの症状があらわれた場合には使用を中止して医師又は薬剤師に相談してください。

皮膚の弱い方は同じところに繰り返し貼らずに少しずつらして使用してください。

パッド部分が濡れたり、汚れたりしたままにしておくと傷の治りがわるくなる場合がありますので、1 日 1 ～ 2 回貼り替えるようにしてください。

小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとにご使用ください。

【保管方法及び有効期間等】

*1. 保管方法

小児の手の届かない所に保管してください。

直射日光を避け、清潔な所に保管してください。

滅菌効果が損なわれますので、使用時に開封してください。

*2. 有効期間

*本品の使用期限は包装に記載〔自己認証(自社データ)による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

*<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室）TEL：0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03 - 3987 - 6111）