

**2015 年 12 月改訂（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）

*2008 年 1 月改訂（第 2 版）

届出番号：13B2X00023000119

一般医療機器 医 04 整形用品 34655000 医療用不織布

F C 滅菌パッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

パッド：レーヨン不織布、ポリエチレン、ポリエステル

【使用目的又は効果】

傷口の被覆及び保護

【使用方法等】

**1. 傷口やそのまわりを水道水等で、汚れや異物を取り除いてください。

*2. 清潔な手で袋からパッドを取り出しそのまま傷口に当ててください。パッドはどちらの面でもご使用頂けます。

*3. パッドの上からテープや包帯（別売）で固定してください。

【使用上の注意】

*包装が開封、破損及び汚損している場合は滅菌品として使用しないでください。

**傷口とそのまわりを清潔にし、水気をとってからご使用ください。水気があるとテープ等が貼りつきにくい場合があります。

使用中、かゆみ・痛み等のかぶれの症状があらわれた場合には使用を中止して医師又は薬剤師にご相談してください。

*分泌液が多い場合には、こまめに貼りかえるようにしてください。

*パッド部分が濡れたり、汚れたりしたままにしておくと傷の治りがわるくなる場合があります。

【保管方法及び有効期間等】

**1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。

**小児の手の届かないところに保管してください。

**滅菌効果が損なわれますので、使用時に開封してください。

**2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載 【自己認証（自社データ）による】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

**<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室）TEL：0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）