

**2015 年 4 月改訂（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）

*2006 年 8 月作成（第 2 版）

届出番号：13B2X00023000122

一般医療機器 医 04 整形用品 13700000 医療ガーゼ

トップバリュ滅菌ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止：一度使用したものは、使用しないでください

再滅菌禁止：再滅菌することは、おやめください。

傷等に埋め込んで使用することは、おやめください

【形状・構造及び原理等】

綿 100%のガーゼを折り畳んだものです。

【使用目的又は効果】

**外科切開口、他の皮膚損傷又は内部構造に対し、出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染から器官の保護を目的とするガーゼです。

【使用方法等】

滅菌パック（個包装）の開口部を引きはがして滅菌ガーゼを取り出してください。

【使用上の注意】

包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる時は使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

**1. 保管方法

水濡れに注意し、高温、多湿、火気、直射日光のあたるところを避けた、清潔なところに保管してください。

小児の手の届かないところに保管してください。

本製品は滅菌済ですので、滅菌パック（個包装）を破らないように保管し、個包装開封後はすみやかにご使用ください。

**2. 有効期間

**本品の使用期限は包装に記載しております。〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

**<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ （お客様相談室） TEL 0120-01-8910 （休日・夜間 TEL 03-3987-6111）