

**2015年8月改訂（第3版）（新記載要領に基づく改訂）

*2007年12月改訂（第2版）

届出番号：13B2X00023000123

一般医療機器 医04 整形用品 13700000 医療ガーゼ

トップバリュガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

**再使用禁止：一度使用したものは、使用しないでください。

傷等に埋め込んで使用することは、おやめください。

【形状・構造及び原理等】

綿100%純綿布

【使用目的又は効果】

**外科切開口、他の皮膚損傷又は内部構造に対し、出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染から器官の保護を目的とするガーゼです。

【使用方法等】

ご使用の際は手指を清潔にし、適度な大きさにカットしてください。

直接患部に使用する時は、傷口を消毒薬等で殺菌してからご使用ください。

【使用上の注意】

体内に残らないように使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光及び火気を避け、清潔な場所に保管してください。

小児の手の届かないところに保管してください。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

**<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）