

\*2015年6月改訂（第2版）（新記載要領に基づく改訂）

2005年8月作成（新様式第1版）

届出番号：13B2X00023000124

一般医療機器 医04 整形用品 70975000 医療脱脂綿

# トップバリュ脱脂綿

## 再使用禁止

### 【禁忌・禁止】してはいけないこと

再使用禁止：一度使ったものは、使用しないでください。

傷等に埋め込んで使用することは、おやめください。

### 【形状・構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿です。

### 【使用目的又は効果】

\*パッド状の綿繊維から成り、医薬品の塗布や、患者の体表から少量の体液を吸収する等を目的とします。

### 【使用方法等】

\*使用用途に応じて適切なサイズに裁断、剥がし、又は巻きつけて使用してください。

### 【使用上の注意】

繊維が患部に残らないように使用してください。

\*包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は使用しないでください。

開封後は早めに使用してください。

\*ご使用后、トイレに流さないで衛生的に処理してください。

綿の表面や内部に黄色又は黒色の斑点状のものがみつかることがありますが、綿の実殻であるため使用上に支障はございません。

### 【保管方法及び有効期間等】

\*水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。

小児の手の届かないところに保管してください。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

\*<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）