

一般医療機器 医 04 整形用品 34864000 救急絆創膏

# HJ ワンタッチパッド

## 再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

### 【形状・構造及び原理等】

\*パッド : レーヨン不織布、ポリエチレン

\*粘着テープ : ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤

### 【使用目的又は効果】

傷口の被覆及び保護。

### 【使用方法等】

\*① 傷口やそのまわりを水道水等で汚れや異物を取り除き、水気をよく拭き取ってください。

\*② はくり紙をパッドが見えるまで両手で広げます。（パッド部分、シール部分に手が触れないように注意してください。）

\*③ パッド部分を傷口に当て、はくり紙を剥がしながら貼ってください。

### 【使用上の注意】

傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないよう注意してください。

水気があるとつきにくい場合があります。

粘着面を患部に貼らないでください。

救急絆創膏にかぶれやすい方は使用に際して注意してください。

使用中、かゆみ・痛み等のかぶれの症状があらわれた場合には、使用を中止して医師又は薬剤師に相談してください。

皮膚の弱い方は、同じ所に繰り返し貼らずに、少しずつらして使用してください。

\*パッド部分が濡れたり、汚れたりしたままにしておくと傷の治りが悪くなる場合がありますので、1 日 1～2 回貼り替えるようにしてください。

小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとにご使用ください。

### 【保管方法及び有効期限等】

#### \*1. 保管方法

小児の手の届かない所に保管してください。

直射日光を避け、清潔な所に保管してください。

滅菌効果が損なわれますので、使用時に開封してください。

#### \*2. 有効期間

\*本品の使用期限は包装に記載〔自己認証(自社データ)による〕

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

\*<http://www.hakujuji.co.jp>

問い合わせ（お客様相談室）TEL：0120-01-8910（休日・夜間 TEL：03-3987-6111）