

一般医療機器 医 04 整形用品 32374000 X 線造影材入りガーゼ

ノルグX滅菌済

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

銅アンモニアレーヨンを経編して形成したガーゼに、X線造影材とX線造影材の隣接部にポリエチレンテレフタレート（PET）糸を編み込んだもの。

X線造影材：スチレン系樹脂に硫酸バリウムを配合し、糸状にしたもの（わかりやすいように有色にしてある）。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる再生セルロース製の、薬品を含まない吸収材料をいう。X線で検知できる成分を用いている。

【使用方法等】

本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、1回限り使用すること。

本品は再滅菌しないこと。

一度開封したものは、滅菌状態が保てないため、開封後は全量を消費すること。

患者の体内への遺残を防止するため、手術前に使用する本品の数を確認し、手術終了時の縫合前にも必ず再度本品の数を確認すること。

縫合前にはレントゲン写真の撮影を行い、術野の造影材像を確かめガーゼの遺残がないことを確認すること。

もし数量が合わないようであれば、レントゲンの撮影角度を変えるなどして複数枚撮影し、造影材像を確認すること。

【使用上の注意】

1. 併用医療機器

ごくまれに電気メス等の使用により引火することがある。

2. 使用方法

体内に留置しないこと。[使い捨て医療機器のため]

裁断加工はしないこと。[裁断箇所から脱落繊維が生じるため]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載 [自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

<https://www.hakujuji.co.jp>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）