

一般医療機器 医04 整形用品 11751000 綿状創傷被覆・保護材

マインパッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 裁断加工禁止
- 体内に深く挿入し、埋め込み又は留置をしないこと

【形状・構造及び原理等】

- 表面材：ポリオレフィン系不織布
 - 吸収材：パルプ・高吸水性樹脂
 - 防水材：ポリエチレン、ポリオレフィン系不織布
 - 伸縮材：ポリウレタン
- これらを結合剤（ホットメルト）で一体化したもの。

【使用目的又は効果】

皮膚の創傷を被覆する、または滲出液を吸収するために用いる、合成繊維、パルプ、親水性ポリマー等からなるパッドをいう。

【使用方法等】

- 本品は消毒済みであるが、必要に応じてエチレンオキシドガス滅菌を施し、1回限り使用すること。
- 本品の吸収面（白色面）を創部に当てること。
- 医療用テープ等の材料を用いて、本品が創部からずれないように固定すること。
- 本品を交換する際はゆっくり慎重に剥がすこと。また、本品が創傷面に固着している場合は、生理食塩水等で固着した部分を湿らせ、新生組織の損傷に注意をしながら剥がすこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 本品使用中に皮膚障害や創感染と思われる症状があらわれた場合には、使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- 本品使用中は創の観察を十分に行い、滲出液の量や創の状態に応じた適切な交換及び処置を行うこと。

2. 不具合・有害事象

本品使用中は下記の症状を生じる恐れがある。

- 創の感染症状
- 創傷及び周囲の皮膚障害（表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎）
- 固着
- 壊死組織の増加
- 疼痛

3. その他の注意

- 防水材側を創部側に使用しないこと。（吸収しないため）
- 本品は、小売での開封小分け販売はできない。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載 [自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

<https://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910

（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）