

一般医療機器 医 04 整形用品 34655000 医療用不織布

# 白十字NWガーゼ 滅菌済

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】

セルロース 100%または、セルロースとポリエステル混綿を水流により絡め布状にしたものを重ねたもの。

切り込みを入れたものもある。

## 【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

## 【使用方法等】

本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、1 回限り使用すること。

本品は再滅菌しないこと。

一度開封したものは、滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること。

## 【使用上の注意】

### 1. 併用医療機器

ごくまれに電気メス等の使用により引火することがある。

### 2. 使用方法

繊維が患部に残らないように注意すること。[不織布繊維が脱落することがあるため]

体内に留置しないこと。[使い捨て医療機器のため]

## 【保管方法及び有効期間等】

### 1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

### 2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載。[自己認証（自社データ）による]

## 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

<https://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910 （休日・夜間 TEL 03-3987-6111）