

一般医療機器 医04 整形用品 34655000 医療用不織布

# ドレーンスワブソフト滅菌済

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】

セルロースとポリエステル混綿を水流により絡め布状にしたものを重ね、切り込みを入れたもの。

## 【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

## 【使用方法等】

本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、1回限り使用すること。

本品は再滅菌しないこと。

一度開封したものは、滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること。

## 【使用上の注意】

### 1. 使用方法

繊維が患部に残らないように注意すること。[不織布繊維が脱落することがあるため]

体内に留置しないこと。[使い捨て医療機器のため]

本品は小売りでの開封販売はできない。[保健衛生上の危害が生じる可能性があるため]

## 【保管方法及び有効期間等】

### 1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

### 2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載。[自己認証（自社データ）による]

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

<https://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）