

一般医療機器 医04 整形用品 34654000 手術用被覆・保護材

一般医療機器 医04 整形用品 11322101 熱傷被覆・保護材

# モイスキンスルーシート

## 再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

- ・表面材:ポリエチレンテレフタレート多孔性フィルム
  - ・中間材:レーヨン不織布
  - ・裏面材:セルロース不織布又はセルロース及びポリエステルを含む不織布又はポリエチレンテレフタレート多孔性フィルム
- これらを結合剤(ホットメルト)又は熱圧着でシート状に一体化したもの

### 【使用目的又は効果】

\* 創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材。また、熱傷皮膚を被覆及び保護し、熱傷部位の滲出液を吸収するために用いる幅広の層状シート。

### 【使用方法等】

- (1) 本品は、有孔フィルム面を創部に当てること。
  - (2) 医療用テープ等の材料を用いて、本品が創部からずれないように固定すること。もしくは、本品の上から衛生材料を用いて被覆固定すること。
  - (3) 本品を滅菌する場合にはエチレンオキサイドガス滅菌すること。
  - (4) 本品は少なくとも1日1回交換すること。
  - (5) 必要に応じて白色ワセリン等を有孔フィルム面に塗布して使用すること。(軟膏剤の添付文書を確認してから使用すること)
  - (6) 本品を交換する際はゆっくり慎重に剥がすこと。また、本品が創傷面に固着している場合は、生理食塩水等で固着した部分を湿らせ、新生組織の損傷に注意をしながら剥がすこと。
- \* (7) 他の吸収性物品を上から重ねて使用することで、本品の吸収を補うことも可能である。

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- (1) 本品使用中に皮膚障害や創感染と思われる症状があらわれた場合には、使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- (2) 本品使用中は創の観察を十分に行い、滲出液の量や創の状態に応じ適切な交換及び処置を行うこと。
- (3) 創に余分な圧力がかけられない様、除圧の処置を適宜行うこと。

#### 2. 不具合・有害事象

本品使用中は下記の症状を生じる恐れがある。

- ・ 創の感染症状
- ・ 創傷及び周囲の皮膚障害(表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎)
- ・ 固着
- ・ 壊死組織の増加
- ・ 疼痛

#### 3. その他の注意

- (1) 不織布側を創部に当てて使用しないこと。[滲出液が少ない場合、創部に固着する可能性があるため]
- (2) 包装が、破損、水濡れ及び他の汚染が見られる場合は使用しないこと。[症状が悪化する可能性あるため]
- (3) 滅菌して使用する場合は再滅菌しないこと。[品質及び安全性を保証できないため]
- (4) 体内に留置しないこと。[使い捨て医療機器のため]
- (5) 本品は小売りでの開封販売はできない。[保健衛生上の危害が生じる可能性があるため]

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

- (1) 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

#### 2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載。[自己認証(自社データ)による]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

<https://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ (お客様相談室) TEL 0120-01-8910

(休日・夜間 TEL 03-3987-6111)