

一般医療機器 医 04 整形用品 34654000 手術用被覆・保護材

# ノルグ II

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】

銅アンモニアレーヨンを経編して形成したもの。

## 【使用目的又は効果】

術後創傷のために用いる適切なサイズの被覆・保護材をいう。

## 【使用方法等】

衛生材料として、適宜滅菌して使用すること。

滅菌（湿熱）の場合には、変色することがある。

## 【使用上の注意】

### 1. 併用医療機器

ごくまれに電気メス等の使用により引火することがある。

### 2. 使用方法

滅菌して使用する場合は再滅菌しないこと [品質及び安全性を保証できないため]

体内に留置しないこと。[使い捨て医療機器のため]

裁断加工はしないこと。[裁断箇所から脱落繊維が生じるため]

## 【保管方法及び有効期間等】

### 1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

### 2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載 [自己認証（自社データ）による]

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

<https://www.hakujuji.co.jp>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）