

一般医療機器 医04 整形用品 11028000 コットンボール

コットンローラー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

脱脂綿（綿100%）をカルボキシメチルセルロースで表面コーティングして棒状に加工し、リントの発生を抑えた製品。

【使用目的又は効果】

口腔内に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の棒状の塊をいう。

【使用方法等】

口腔内に用いる衛生材料として使用すること。

【使用上の注意】

- 包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は使用しないこと。[保健衛生上の危害が生じる可能性があるため。]
- 開封後は早めに使用すること。[保健衛生上の危害が生じる可能性があるため。]
- 口腔外科用を使用する場合は、滅菌すること。[保健衛生上の危害が生じる可能性があるため。]
- 滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。[品質及び安全性を保証できないため。]
また、蒸気滅菌した場合には毛羽立ちが発生することがある。
- 体内に留置しないこと。[使い捨て医療機器のため。]
- 誤飲しないこと。[気道消化管を塞ぐ可能性があるため。]
- 綿の表面や内部に黄色又は黒色の斑点状のものがみつかることがあるが綿の実殻であるため使用上に支障はない。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載。[自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

<https://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）