

ラパクリアロール

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


セルロース 100%不織布を円柱状に丸め、結合剤（ポリビニルアルコール）にて接着したもの。または、セルロース 100%不織布を円柱状に丸め、綿 100%の糸で縫製したもの。または、セルロース 100%不織布を円柱状に丸め、結合剤（ポリビニルアルコール）にて接着し、綿 100%の糸で縫製したもの。

主に鏡視下手術で使用される衛生材料である。

体内残留防止のためX線造影用の糸を1本以上含有している。

X線造影材：スチレン系樹脂に硫酸バリウムを配合し、糸状にしたもの（わかりやすいように有色にしてある）。

図． ラパクリアロール

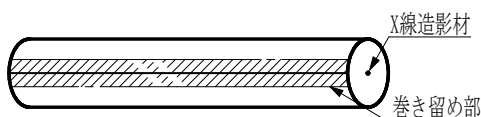

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【使用方法等】

衛生材料として適宜滅菌して使用してください。

患者の体内への遺残を防止するため、手術前に使用する本品の数を確認し、手術終了時の縫合前にも必ず再度本品の数を確認してください。

縫合前にはレントゲン写真の撮影を行い、術野の造影材像を確かめ不織布の遺残がないことを確認してください。

もし数量が合わないようであれば、レントゲンの撮影角度を変えるなどして複数枚撮影し、造影材像を確認してください。

【使用上の注意】

1. 併用医療機器

ごくまれに電気メス等の使用により引火することがあります。

2. 使用方法

滅菌して使用する場合は再滅菌しないでください。

〔品質及び安全性を保証できないため〕

体内に留置しないでください。〔使い捨て医療機器のため〕

裁断加工はしないでください。〔裁断箇所から脱落繊維が生じるため〕

X線造影材部分をつかましないでください。／ 布地やX線造影材に強い負荷がかからないように使用してください。

〔X線造影材を直接挟むと、切れたり、抜け落ちたりして体内に残存するおそれがあるため／ 本品の縁部を把持し強い負荷がかかると、破損するおそれがあるため〕

本品は、10mm 以上のポートでご使用ください。／ 使用後の本品を取り出す際は、本品の中央部を把持して取り出さないでください。

〔ポートから取り出せない場合があります／ 本品に強い負荷がかかり、破損するおそれがあるため〕

3. その他の注意

本品は、小売での開封小分け販売はできません。〔保健衛生上の危害が生じる可能性があるため〕

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。

2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載。〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

<https://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910

（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）