

一般医療機器 医 04 整形用品 34654000 手術用被覆・保護材

# モイスキンパッド

## 再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

#### 1.使用方法

再使用禁止

裁断加工禁止

### 【形状・構造及び原理等】

表面材:ポリエチレンテレフタレート又はポリエチレン

吸収材:レーヨン又はレーヨンとポリエチレンテレフタレートの

複合材・紙・高吸水性樹脂

防水材:ポリエチレン・ポリプロピレン

これらを結合剤または熱圧着でシート状に一体化したもの。

### 【使用目的又は効果】

術後創傷の被覆・保護を目的とした幅広の層状ガーゼパッド。

### 【使用方法等】

#### 1.使用方法

- \*① 創の大きさよりやや大きいサイズの本品を選び、  
本品の吸収面(有孔フィルム面)を創部に当てること。
- \*② 医療用テープ等の材料を用いて、本品が創部からずれないように  
固定すること。
- \*③ 必要に応じて白色ワセリン等を吸収面(有孔フィルム面)に  
塗布して使用すること。  
(軟膏剤の添付文書を確認してから使用すること)
- \*④ 本品は未滅菌のため、傷口等、滅菌を必要とする部位に使用する  
場合は必ず滅菌を行ってから使用すること。  
(滅菌方法はエチレンオキシドガス滅菌とし1回限りとすること)

#### 2.使用方法等に関連する使用上の注意

- \*格子印刷(防水材)側を創部に当てて使用しないこと。  
[吸収しないため]
- \*開封したまま放置しないこと。  
水濡れ・破損・汚染が見られる場合は使用しないこと。  
[品質及び安全性を保証できないため]
- \*本品使用中は創の観察を十分に行い、滲出液の量や創の状態に  
応じ適切な交換及び処置を行うこと。また、長時間の使用を避け、  
1日1回程度貼る場所を少しずつして貼り替えること。  
[肌のかぶれ・損傷を防ぐため]

- \*創に余分な圧力がかからない様、除圧の処置を適宜行うこと。  
[肌のかぶれ・損傷を防ぐため]
- \*本品を交換する際はゆっくり慎重に剥がすこと。また、本品が創  
傷面に固着している場合は、生理食塩水等で固着した部分を  
湿らせ、新生組織の損傷に注意をしながら剥がすこと。
- \*本品使用中に皮膚障害や創感染と思われる症状があらわれた  
場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- \*本品は、小売での小分け販売はできない。  
[保健衛生上の危害が生じる可能性があるため]
- \*体内に深く挿入し、埋め込み又は留置させないこと。  
[使い捨て医療機器のため]

#### 2. 不具合・有害事象

\*本品使用中は下記の症状を生じる恐れがある。

- ・ 創の感染症状
- ・ 創傷及び周囲の皮膚障害(表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、  
発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎)
- ・ 固着、壊死組織の増加、疼痛

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

- \*直射日光及び火気を避け、  
湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- \*開封後は小分けせずに容器に入れたまま保管すること。

#### 2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載

\*[自己認証(自社データ)による]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

<https://www.hakujuji.co.jp>

問い合わせ (お客様相談室) TEL 0120-01-8910

(休日・夜間 TEL 03-3987-6111)