

一般医療機器 33961001 単回使用クラス I 処置キット

白十字ケアセット I

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 本品は以下の構成品のうち、2 つ以上の製品を組み合わせた医療機器である。

(1) 13700000：医療ガーゼ（ハクジュウジ大学ガーゼ・白十字折りガーゼ・*ハクジュウジYガーゼ・ベルガーゼ・**コメガーゼ）

(2) 32374000：X線造影材入りガーゼ（白十字X Pガーゼ・ハクジュウジベルX P・ハクジュウジコメX P・白十字ガーゼX）

(3) 13705000：X線造影材入りスポンジ（ハクジュウジオペーゼX P・白十字オペーゼX・**オベスポンジX 滅菌済、**ハクジュウジNWオペーゼX 滅菌済）

(4) 11028000：コットンボール（シルキー綿球・**白十字綿球（未滅菌）・**白十字X P綿球（未滅菌）・ノイロボール・**デンタルメンII）

(5) 34655000：医療用不織布（シングルガーゼ・シングルドレーンスワブ・ソフキュアガーゼ・**ドレーンスワブソフト）

(6) 15085000：開腹術用スポンジ（ハクジュウジオペーゼ）

(7) 34654000：手術用被覆・保護材（シングルパッドA・ハクジュウジサージカルパット）

(8) 70975000：医療脱脂綿（ハクジュウジ脱脂綿）

(9) 雑品：**エースタイ（伸縮包帯）・綿棒・検診台シート・ピンセット（非手術器具）・不織布・セーフティシート・ラミート・サージカルガウン

(10) 35531000：単回使用汎用サージカルドレープ（**手術・処置用不織布覆布）

(11) 34654000：手術用被覆・保護材、11322101：熱傷被覆・保護材（**モイスキンパッド 滅菌済）

2. 組み合わせによって同封されない製品がある。

3. 同封されている構成品及び数量は、直接の容器にラベルで表示されている。

【使用目的又は効果】

一般的な処置を行うために必要なクラス I の各種器具、被覆保護材及び医薬品の全てを含むブレパッケージされたキットをいう。

本品は単回使用である。

【使用方法等】

*本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、裁断加工等は行わず、そのまま直ちに一回限り使用する。

*一度開封したものは滅菌状態が保てないため、直ぐに全量を消費すること。

*本品は、再滅菌しないこと。

【使用上の注意】

*体内に深く挿入し、埋め込み又は留置をしないこと。[使い捨て医療機器のため]

*ピンセットは部材の把持以外の目的で使用しないこと。[保健衛生上の危害が生じる可能性があるため]

*本品は小売りでの開封小分け販売はできない。[保健衛生上の危害が生じる可能性があるため]

【保管方法及び有効期間等】

*1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

*2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載。[自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

**<https://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910

（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）