

一般医療機器 33961001 単回使用クラスⅠ処置キット

## 白十字ケアセットⅠ未滅菌

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

1. 本品は以下の構成品のうち、2つ以上の製品を組み合わせた医療機器である。

- (1) 13700000：医療ガーゼ（ハクジュウジ大学ガーゼ・白十字折りガーゼ・\*\*ハクジュウジYガーゼ・バルガーゼ・\*\*コメガーゼ）
- (2) 32374000：X線造影材入りガーゼ（白十字XPガーゼ・ハクジュウジバルXP・ハクジュウジコメXP）
- (3) 13705000：X線造影材入りスポンジ（ハクジュウジオペーゼXP・\*\*ハクジュウジNWオペーゼX）
- (4) 11028000：コットンボール（シルキー綿球・\*\*白十字綿球（未滅菌）・\*\*白十字XP綿球（未滅菌）・ノイロボール・\*\*デンタルメンII）
- (5) 34655000：医療用不織布（シングルガーゼ・シングルドレーンスワブ・ソフキュアガーゼ・\*\*ドレーンスワブソフト）
- (6) 15085000：開腹術用スポンジ（ハクジュウジオペーゼ）
- (7) 34654000：手術用被覆・保護材（シングルパッドA・ハクジュウジサージカルパット）
- (8) 70975000：医療脱脂綿（ハクジュウジ脱脂綿）
- (9) 雑品：\*\*エースタイ（伸縮包帯）・綿棒・検診台シート・ピンセット（非手術器具）

2. 組み合わせによって同封されない製品がある。

3. 同封されている構成品及び数量は、直接の容器にラベルで表示されている。

#### 【使用目的又は効果】

一般的な処置を行うために必要なクラスⅠの各種器具、被覆保護材及び医薬品の全てを含むプレパッケージされたキットをいう。

本品は単回使用である。

#### 【使用方法等】

\*本品を滅菌し、無菌的に滅菌袋より取り出し、裁断加工等は行わずそのまま直ちに、一回限り使用する。滅菌方法は、EOガス滅菌及び蒸気滅菌135度以下を推奨。

#### 【使用上の注意】

\*体内に深く挿入し、埋め込み又は留置をしないこと。[使い捨て医療機器のため]

\*\*ピンセットは部材の把持以外の目的で使用しないこと。[保健衛生上の危害が生じる可能性があるため]

\*\*本品は小売での開封小分け販売はできない。[保健衛生上の危害が生じる可能性があるため]

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### \*1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

##### \*2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載。[自己認証（自社データ）による]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

\*\*<https://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910

（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）