

**2017 年 2 月改訂（第 4 版）（新記載要領に基づく改訂）

届出番号：27B1X00020219005

*2012 年 1 月改訂（第 3 版）

歯科材料 07 歯科用ワックス
歯科用キャスティングワックス 16189000
一般医療機器

スターワックス

【形状・構造及び原理等】

本品は、インレー、クラウン、ブリッジ等のワックスアップに使用するカービング用ワックスである。

〔外観図〕



〔種類〕

- ・ CB グリーン
- ・ CB ブルー
- ・ CB レッド
- ・ CB ベージュ
- ・ CB グレー
- ・ エステティック デンチン A1
- ・ エステティック デンチン B3
- ・ エステティック トランスペアレント
- ・ ミリング
- ・ サービカル

〔原理〕

石こうによる鋳型を作製するとき使用する原料で、最終的には焼却され、金属に置き換わる。

【使用目的又は効果】

本品は、ロストワックス法による固定式補綴修復物ろう型作製に用いる。

【使用方法等】

支台歯模型に適用してワックスアップする。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

1. 本品を支台歯模型に適用する時は、内部に気泡等が入らないようにすること。
2. 埋没後は完全に焼却すること。

【使用上の注意】**

〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

〔重要な基本的注意〕

1. 本品は可燃性であるので、使用の際には引火しないよう注意すること。
2. 本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所等）に放置しないこと。
3. 使用場所及び保管場所には消火装置を備えること。

【保管方法及び有効期間等】**

〔使用期限〕

本品は包装に記載の使用期限までに使用すること。

〔自己認証（製造元データによる）〕

（例：  XXXX-YY は、使用期限 XXXX 年 YY 月を示す。）

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】* **

製造販売業者： 白水貿易株式会社

製造国： ドイツ

製造業者： Dentaureum GmbH & Co. KG

販売業者： 株式会社デンタリード

電話番号： 06-6396-4448

FAX 番号： 0120-24-0892

ホームページ： <https://www.dentalead.co.jp>