

機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント技工用器材 70757000
一般医療機器

プリマ クイックアバットメント アナログ

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕

種類	外観写真
SD 5.0mm	
RD 5.0mm	
RD 6.0mm	
WD 5.0mm	
WD 6.0mm	

〔成分〕

チタン合金

〔原理〕

本品は、アバットメントと同一の形状を先端に有しており、口腔内のアバットメントを模型上に正確に再現する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

- インプラントにアバットメントを装着し、全顎印象を採得する。
- 必要に応じてクイックキャップをアバットメントに装着する。
- クイックキャップ内面の平坦部と溝あるいは印象に形成されたアバットメント部の窪みの平坦面と溝に本品の平坦面と溝を一致させる。
- 印象に石膏又はエポキシレジンを注入して、作業用模型を作製する。（本品は模型に組み込まれる）

〔使用方法に関する使用上の注意〕

- アバットメントを形成してその形状に変更を加えた場合は、本品は使用しないこと。
- 本品をご使用の際には必ずアバットメントと同色の本品を選択すること。

【使用上の注意】*

〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：白水貿易株式会社
電 話 番 号：06-6396-4400
F A X 番 号：06-6396-4457
ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>
製 造 国：アメリカ合衆国
製 造 業 者：Keystone Dental, Inc.

取扱説明書を必ずご参照ください