

機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント技工用器材 70757000
一般医療機器

プリマ アバットメント ラボスクリュー

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕



〔成分〕

チタン合金

〔原理〕

本品は、作業模型上のインプラントアナログにアバットメントを固定するために使用するスクリューである。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

1. 作業用模型上のインプラントアナログにアバットメントを装着する。
2. 本品をアバットメントのスクリューアクセスホールに貫通させてインプラントアナログに挿入し、クアッドドライバーを用いて本品を締結し、アバットメントをインプラントアナログに対して固定する。

〔使用方法に関する使用上の注意〕

1. 本品を締結する際は、所定の器具を用いること。
2. 本品は技工用としてのみ使用し、口腔内で使用しないこと。

【使用上の注意】*

〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：白水貿易株式会社

電 話 番 号：06-6396-4400

F A X 番 号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製 造 国：アメリカ合衆国

製 造 業 者：Keystone Dental, Inc.