

機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント技工用器材 70757000
一般医療機器

プリマ キックアバットメント プラスチックスリーブ

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕

種類	外観写真
SD 5.0mm ロッキング	
SD 5.0mm ノンロッキング	
RD 5.0mm ロッキング	
RD 5.0mm ノンロッキング	
RD 6.0mm ロッキング	
RD 6.0mm ノンロッキング	
WD 5.0mm ロッキング	
WD 5.0mm ノンロッキング	
WD 6.0mm ロッキング	
WD 6.0mm ノンロッキング	

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：白水貿易株式会社
電 話 番 号：06-6396-4400
F A X 番 号：06-6396-4457
ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>
製 造 国：アメリカ合衆国
製 造 業 者：[Keystone Dental, Inc.](#)

〔成分〕

プラスチック

〔原理〕

内部がアバットメントと同一の形状を有する本品を、アバットメントに装着してワックスを填入し補綴物を製作することにより、アバットメントと補綴物の適合精度を高める。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

1. 作業用模型上のアバットメントアナログに本品を指圧により被せ、適合を確認する。
2. 必要に応じてラバーホイールで本品の上部をカットしてワックスを築盛し、アンダーカットの部分を除く。
3. 通法にしたがって、スプルー植立、埋没、鋳造する。
4. フレームの掘り出し後、鋳造時に出来た微小なバリ等はアナログに装着する前にラバーホイールで除去する。
5. 通法に従い、フレームを仕上げる。
6. 作製したフレームをもとに、補綴物を製作する。

〔使用方法に関する使用上の注意〕

1. アバットメントを形成してその形状に変更を加えた場合は、本品は使用しないこと。
2. 本品ご使用の際には、必ずアバットメントと同色の本品を選択すること。

【使用上の注意】*

〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

取扱説明書を必ずご参照ください