

歯科材料 08 歯科用石こう及び石こう製品
歯科高温鑄造用埋没材 70900020
一般医療機器

キャストリットスーパーC

【形状・構造及び原理等】

【概要】

本品は粉末、練和液及びパワーリキッドから構成される二酸化けい素を主成分としたリン酸塩系歯科高温鑄造用埋没材である。



【構成】

粉末：150g×40袋
練和液：1瓶1000mL
パワーリキッド：1瓶1000mL

【使用目的又は効果】

鑄造用埋没に用いる。

【使用方法等】

1. 金属リングの内側に1mmのライナーを巻く。
2. リングの上端からワックスまでは最低5～8mmのスペースを空けてください。
3. 練和の比率

粉末	練和液
60g	13mL
150g	34mL
300g	68mL

パワーリキッドを使用する場合はリキッド：精製水=60：40の割合で希釈した液で上記表と同じ比率で練和する。

4. 練和時間：60秒
5. 作業時間：4～5分（20～22℃室温下）
6. 最終硬化時間：40分
7. 室温のリングファーマスに入れ、250℃まで毎分5℃で昇温し60分係留する。その後、950℃まで毎分5℃で昇温し30～60分係留する。
8. 鑄造後室温に戻るまで放冷し、手で持てる状態になったら水に浸し、粉末の飛散を防ぎ、注意しながら鑄造体を掘り出す。

【使用上の注意】**

【使用注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成26年10月31日事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【重要な基本的注意】

1. 本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症のある術者は、手袋等を用いて直接本品に触れないようにすること。又、本品の使用により発疹等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
2. 本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避ける

ため、局所吸塵装置や公的機関が認可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。

3. 本品が眼に入らないように注意すること。万一眼に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
4. 本品の切削等の際には、目の損傷を防ぐために保護メガネ等を使用すること。
5. 本品を加熱する際には、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、加熱により発生するガスを吸入しないこと。

【保管方法及び有効期間等】**


【保管方法】

1. 湿気のない場所に保管すること。
2. 保管温度：18～23℃で保存すること。
3. 練和液は0℃以下で凍結します。一度凍ってしまうと使用できなくなります。練和液の凍結を防止するため5℃以上で保管すること。

【使用期限】

本品の液は包装に記載の使用期限までに使用すること。

【自己認証（製造元データによる）】

（例：  XXXX-YY は使用期限 XXXX 年 YY 月を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】***

製造販売業者： 白水貿易株式会社

製造国： ドイツ

製造業者： Dentaurum GmbH & Co. KG

販売業者： 株式会社デンタリード

電話番号： 06-6396-4448

FAX番号： 0120-24-0892

ホームページ： <https://www.dentalead.co.jp>