

機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント技工用器材 70757000
一般医療機器

プリマコネックス リーマーツール

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕

本品は、リーマーツール、及びセンタリングピン(SD、RD、WD、5.0)から構成される。



〔原理〕

ハンドピースの回転によって本品を高速回転させることにより、メタルフレーム内のバリ等を除去する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

1. センタリングピン先端部をメタルフレームに挿入する。単独歯補綴物を作製する場合は、センタリングピン先端部の平坦面をフレーム内の平坦面に合わせる。
2. ハンドピースにリーマーツールを装着する。
3. リーマーツールにセンタリングピンを装着する。
4. ハンドピースの回転数を 15,000rpm 以下に設定して回転させ、リーマーツールを軽く押しながらフレーム内の突起やバリ等を慎重に除去する。
5. フレーム内以外の部分のバリ等を除去してマージンを仕上げます。基部の残りの部分を仕上げ、通法にしたがってポーセレンを築盛する。

〔使用方法に関する使用上の注意〕

1. ハンドピースの回転数は 15,000rpm 以下で使用すること。
2. 多数歯用連結補綴物を作製する場合は、メタルフレーム段階での試適を推奨する。

【使用上の注意】*

〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：白水貿易株式会社

電話番号：06-6396-4400

F A X 番号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造国：アメリカ合衆国

製造業：Keystone Dental, Inc.

取扱説明書を必ずご参照ください