

機械器具 58 整形用機械器具  
歯科インプラント技工用器材 70757000  
一般医療機器

## プリマ マルチユニットアバットメント アナログ

### 【形状・構造及び原理等】

[形状]

種類	外観写真
SD/RD	
WD	

[原理]

本品は、アバットメントと同一の形状を本品の先端に有しており、口腔内のアバットメントを作業用模型上に正確に再現する。

### 【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

### 【使用方法等】

1. アバットメントにインプレッションポストを装着し、インプラントが埋植された顎の全顎印象を採得する。
2. 印象内のインプレッションポストへ本品を装着する。
3. インプレッションポストに同梱されているインプレッションポストピンがインプレッションポストを貫通した状態で本品の内部スレッドに達していることを確認する。
4. クアッドドライバーをポストピンに装着し、時計方向に回転させてポストピンを締結し、本品をインプレッションポストに固定する。
5. 本品のまわりに石膏又はエポキシレジンを注入・築盛して、作業用模型を作製する。（本品は作業用模型に組み込まれる）
6. 石膏またはエポキシレジン硬化後、クアッドドライバーでポストピンを緩めて本品から取り外されたことを確認し、印象から撤去する。
7. 印象を本品が組み込まれた作業用模型から撤去する。
8. 本品に、ゴールドスリーブ又はプラスチックスリーブを装着し、ゴールドスリーブはワックスピンで、プラスチックスリーブはコーピングスクリューで締結する。

[使用方法に関する使用上の注意]

本品を使用の際には必ずアバットメントの種類とサイズに対応した本品を選択すること。

### 【使用上の注意】\*

[使用注意]

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*

製造販売業者：白水貿易株式会社

電話番号：06-6396-4400

F A X 番号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造国：アメリカ合衆国

製造業者：[Keystone Dental, Inc.](http://www.keystone-dental.com)

取扱説明書を必ずご参照ください