

機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント技工用器材 70757000
一般医療機器

プリマ ロケーター アバットメントアナログ

【形状・構造及び原理等】

【形状】



【原理】

本品は、アバットメントと同一の形状を本品の先端に有しており、口腔内のアバットメントを作業用模型上に正確に再現する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

1. 全顎印象に組み込まれたインプレッションコーピングに本品を装着する。
2. 印象に石膏又はエポキシレジンを注入・築盛して、作業用模型を作製する。（本品は作業用模型に組み込まれる）
3. ブラックプロセッシングメールを介してロケーターアバットメントに付属のデンチャーキャップを本品上部に装着し、ワックスデンチャーの作製を行う。
4. 埋没、スプルー、脱蠟、重合後、デンチャーキャップとブラックプロセッシングメールを本品から取り外し、ブロックアウトスパーサーを本品周囲に被せる。
5. デンチャーキャップとブラックプロセッシングメールを再び本品に装着し、デンチャー床中のデンチャーキャップの位置を確定する。
6. デンチャー床とデンチャーキャップを最終的に重合する。
7. 最終重合後、デンチャーを本品及び模型から取り外す。

【使用上の注意】*

【使用注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：白水貿易株式会社
電 話 番 号：06-6396-4400
F A X 番 号：06-6396-4457
ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>
製 造 国：アメリカ合衆国
製 造 業 者：[Keystone Dental, Inc.](#)

取扱説明書を必ずご参照ください