

**2021年2改訂（第3版）

届出番号：27B1X00020220080

*2016年8月改訂（第2版）（新記載要領に基づく改訂）

機械器具 62 歯科用切削器

歯科用エクスカベータ 35811000

一般医療機器

LM アペックスエクスカベータ

【形状・構造及び原理等】** *

[形状]

把柄部

Si：直径φ8.5mm（両端部）



作業部

種類	左作業部	右作業部
GFV 1.0mm LM 613-614		

[種類]

GFV 1.0mm LM 613-614 Si

【使用目的又は効果】

逆根管充填時の脱灰した根尖部の齶蝕象牙質の切削や根管充填材等の除去のために用います。

【使用方法等】

刃部を齶蝕象牙質及び根管充填材にあて、押圧により切削又は除去を行います。

【使用上の注意】*

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成26年10月31日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保守・点検に係る事項】** *

付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌パック等に入れてオートクレーブ滅菌（134℃-137℃、2bar、3分以上）を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】** *

製造販売業者 白水貿易株式会社

電話番号 06-6396-4400

FAX番号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造業者 LM-Instruments Oy

製造国 フィンランド