

再使用禁止

グリッター

【禁忌・禁止】**

再使用禁止

〔使用期限〕

包装に記載（製造元データによる自己認証）

（例：🕒 YYYYMMDD は使用期限 YYYY 年 MM 月 DD 日を示す。）

【形状・構造及び原理等】

本品は、高粘度のペーストの歯面研磨材（ミント ミディアム）である。

成分：研磨材（バミス）、グリセリン、サッカリン Na、香料、その他
付属品：カップホルダー

【使用目的又は効果】

本品は、歯面研磨に使用する。

【使用方法等】

1. 本品をカップホルダーに装着し、人差指等に付ける。
2. ブラシ、歯磨カップ等の研磨用器具の先端に本品を直接あてがい、本品を適量取り出す。（下図）



3. 歯面を研磨する。研磨後は、水で洗浄する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

本品は 1 回の分量が入っており、患者ごとに使い切ること。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

1. 飲み込まないように注意すること。使用中に飲み込んだりするのを防ぐために排唾管の併用が勧められる。
2. 使用中は、ブラシ等に十分なペーストを補充し、歯面の過熱を防ぐこと。
3. ペーストが乾燥している場合は、水を 1～2 滴加えて軟らかくしてから使用すること。

【使用上の注意】**

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

〔重要な基本的注意〕

1. 本品の使用により発疹等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2. 本品は 5,000 回転以下で使用すること。高速回転で使用するとペーストが飛び散る恐れがある。
3. 本品は目に入らないように注意すること。万一目に入ったときは、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

15～30℃

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* **

製造販売業者 白水貿易株式会社

電話番号 06-6396-4400

FAX 番号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造業者 Premier Dental Products Company

製造国 アメリカ