

機械器具 64 歯科用探針
歯周ポケットプローブ 31848000
一般医療機器
ペリオワイズ

【形状・構造及び原理等】

[概要]

ゲージ付き探針をもつ高分子樹脂製の手持ち型器具である。



[種類]

本品は作業部の目盛りの違いにより、以下の2種類がある。

種類	目盛りの位置
3-5-7-10	3、5、7、10mmの位置
UNC	1mm刻みで12mmまで

【使用目的又は効果】

歯周ポケットの深さを測定するために用いる。

【使用方法等】*

本品の作業部を歯周ポケットの底部まで挿入し、目盛りを目視することによって歯周ポケットの深さを測定する。

【使用上の注意】* **

[使用注意]

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

(注意事項の内容例)

平成26年10月31日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

[重要な基本的注意]

使用・洗浄・滅菌を繰り返す毎に目盛りの色は少しずつ薄くなっていくため、目盛りの色が見えなくなったら新しいものと交換すること。

【保守・点検に係る事項】**

[洗浄・滅菌]

使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに水道水等で除去すること。

本品を使用する前には、洗浄後水分を除去し十分乾燥させ、オートクレーブ滅菌（121℃、20分以上、又は135℃、3分以上）、又は、乾熱滅菌（177℃以下）のいずれかで滅菌処理を行うこと。

滅菌・消毒時、他の金属インスツルメントとの接触により、色のはがれたりするため、滅菌バッグ等の使用が薦められる。尚フェノール含有の薬液は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 白水貿易株式会社

電話番号 06-6396-4400

FAX番号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造業者 Premier Dental Products Company

製造国 アメリカ