

## プレミア プローブ

### 【形状・構造及び原理等】\*

[概要]

本品は、目盛り付き探針をもつステンレス製の手持ち型器具である。

[種類]

WHO CC ゴールドマンフォックス CC ネイバース 1N  
 YO 9 SE ゴールドマンフォックス ネイバース 2N  
 YO 9 CC DE ゴールドマンフォックス ネイバース 2N CC  
 ミシガン 0 ミシガン 0 CC の11種類

形状及び目盛りの位置は次のとおり。

種類	左チップ形状	右チップ形状
WHO		
YO 9		
YO 9 CC		
ミシガン 0		
ミシガン 0 CC		
ゴールドマン フォックス CC		
SE ゴールドマン フォックス		
DE ゴールドマン フォックス		
ネイバース 1N		
ネイバース 2N		
ネイバース 2N CC		

目盛りの位置（先端からmm）

WHO: 3.5、5.5、8.5、11.5

YO 9: 3、6、9、12

YO 9 CC: 3、6、9、12

ミシガン 0: 3、6、8、10

ミシガン 0 CC: 3、6、8、10

ゴールドマン フォックス CC: 1、2、3、5、7、8、9、10

SE ゴールドマン フォックス: 1、2、3、5、7、8、9、10

DE ゴールドマン フォックス: 1、2、3、5、7、8、9、10

ネイバース 1N、ネイバース 2N: なし

ネイバース 2N CC: 3、6、9、12

### 【使用目的又は効果】

歯周ポケットの深さを測定するために用いる。

### 【使用方法等】

本品作業部を歯周ポケットの底部まで挿入し、目盛りを目視することによって歯周ポケットの深さを測定する。

### 【使用上の注意】\*\*

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

(注意事項の内容例)

平成26年10月31日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

### 【保守・点検に係る事項】\*\*

[洗浄・滅菌]

付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バッグ等に入れ、オートクレーブ滅菌（121℃、20分以上、又は135℃、3分以上）を行う。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\* \*\*

製造販売業者 白水貿易株式会社

電話番号 06-6396-4400

FAX番号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造業者 Premier Dental Products Company

製造国 アメリカ