

機械器具 64 歯科用探針
歯周ポケットプローブ 31848000
一般医療機器

LM ペリオプローブ

【形状・構造及び原理等】 **

[形状]

把柄部

XSi：直径φ11.5mm（両端部）



Si：直径φ8.5mm（両端部）



作業部

種類	左作業部	右作業部
LM 8-520B		
LM 23-52B		
LM 23-520B		
LM 23-530B		
WHO LM 8-550B		
WHO LM 23-550B		
ネイバース LM 20-21		
ファーケーション LM 20B-21B		
ファーケーション LM 20-21		
ウィリアム LM 51		
WHO LM 550B		
マーキス 12 LM 53B		
LM プローブ 52B		
ノースキャロライ ナプローブ 54B		

[種類]

・ダブルエンド

LM 8-520B XSi、Si
LM 23-52B XSi、Si
LM 23-520B XSi、Si
LM 23-530B XSi、Si
WHO LM 8-550B XSi、Si
WHO LM 23-550B XSi、Si
ネイバース LM 20-21 XSi、Si
ファーケーション LM 20B-21B XSi、Si
ファーケーション LM 20-21 XSi、Si

・シングルエンド

ウィリアム LM 51 XSi、Si
WHO LM 550B XSi、Si
マーキス 12 LM 53B XSi
LM プローブ 52B XSi、Si
ノースキャロライナプローブ 54B XSi

【使用目的又は効果】

歯周疾患の進行状況の観察や歯周ポケットの深さの測定に用います。

【使用方法等】

触診及びポケットの深さの測定により歯肉等の状態を診察します。

【使用上の注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成26年10月31日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保守・点検に係る事項】 **

付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バッグ等に入れ、オートクレーブ滅菌（134℃-137℃、2bar、3分以上）を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 *

製造販売業者 白水貿易株式会社

電話番号 06-6396-4400

FAX番号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造業者 LM Instruments Oy

製造国 フィンランド