

歯科材料 07 歯科用ワックス
歯科用キャストイングワックス 16189000
一般医療機器

スペシャルキャストイングワックス

【形状・構造及び原理等】

【概要】

本品はインレー、クラウン、ブリッジ等のワックスアップに使用するカービング用ワックスである。

【外観図】



【原理】

鑄型を作製するとき使用する材料で、最終的には焼却され、金属に置き換わる。

【使用目的又は効果】

【使用目的】

本品は、ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製に用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

石こう模型及び金属表面に適用してワックスアップする。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 本品を石こう模型及び金属表面に適用する時は、内部に気泡等が入らないようにすること。
2. 埋没後は完全に焼却すること。

【使用上の注意】**

【使用注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成26年10月31日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【重要な基本的注意】

1. 本品は可燃性のため、使用の際には引火しないよう注意すること。
2. 本品を使用する際には、火傷に注意すること。
3. 本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所等）に放置しないこと。
4. 使用場所及び保管場所には消火装置を備えること。

【保管方法及び有効期間等】**

【保管方法】

本品は火気厳禁の冷暗所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。

【使用期限】

本品は包装に記載の使用期限までに使用すること。

[自己認証（製造元データによる）]

※（例  XXXX-YY は、使用期限 XXXX年 YY月を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* **

製造販売業者：白水貿易株式会社

製造国：ドイツ

製造業者：Dentaurum GmbH & Co. KG

販売業者：株式会社デンタリード

電話番号：06-6396-4448

FAX番号：0120-24-0892

ホームページ：<https://www.dentalead.co.jp>