

歯科材料 06 歯科用印象材料
歯科複模型用寒天印象材 70890000
一般医療機器

デュプリカット

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

本品は複模型作製の寒天印象材である。

〔外観図〕



〔原理〕

ゲル状の寒天印象材を加温してゾル状にし、石こう模型を配置したフラスコに流し込んで型を作製する。

【使用目的又は効果】

〔使用目的〕

本品はパーシャルデンチャーやクラウンブリッジの複模型を作製するための寒天印象材として使用する。

【使用方法等】

〔使用方法〕

1. 本品を細かく切り刻む。
2. ウォーターバス等を用いて湯煎を行い、攪拌しながら 92℃ まで加温して溶解する。
3. ウォーターバス等から取り出し、52℃ まで攪拌しながら冷却する。
4. 石こう模型を配置したフラスコに本品を流し込む。
5. 常温で 20 分間放冷後、フラスコの下部を 20～24℃ の水中に 20 分間浸す。
6. フラスコから石こう模型を取り出す。

溶解温度 : 92℃
注入温度 : 50～52℃
ゲル化時間 : 30～45 分

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

1. 本品を 92℃ 以上に加温しないこと。
2. 加温から冷却を繰り返す毎に、蒸発を補うために本品 1kg につき 10mL の水を補充すること。
3. 使用後、ゲルをきれいにし、正しく保存すれば、最低 10 回位は溶解して再使用することができます。

【使用上の注意】**

〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【保管方法及び有効期間等】**

〔使用期限〕

本品は包装に記載の使用期限までに使用すること。

〔自己認証（製造元データによる）〕

※（例  XXXX-YY は、使用期限 XXXX 年 YY 月を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* **

製造販売業者： 白水貿易株式会社

製造国： ドイツ

製造業者： Dentaurum GmbH & Co. KG

販売業者： 株式会社デンタリード

電話番号： 06-6396-4448

FAX 番号： 0120-24-0892

ホームページ： <https://www.dentalead.co.jp>