

【形状・構造及び原理等】** *

[形状]

把柄部

ES：直径φ13.5mm（両端部）



XSi：直径φ11.5mm（両端部）



Si：直径φ8.5mm（両端部）



作業部

種類	左作業部	右作業部
1.0-1.5mm LM 340-360		
1.2-2.0mm LM 350-380		
1.8-2.5mm LM 370-390		

[種類]

LM 1.0-1.5mm 340-360 ES、XSi、Si

LM 1.2-2.0mm 350-380 ES、XSi、Si

LM 1.8-2.5mm 370-390 ES、XSi、Si

【使用目的又は効果】

歯科材料を歯や根管に充填するために用います。

【使用方法等】

根管充填材を本品の先端にとり、根管等へ圧接することにより充填を行います。

【使用上の注意】*

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成26年10月31日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保守・点検に係る事項】** *

付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バック等に入れてオートクレーブ滅菌（134℃-137℃、2bar、3分以上）を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者 白水貿易株式会社

電話番号 06-6396-4400

FAX番号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造業者 LM-Instruments Oy

製造国 フィンランド