

LM バーニッシャー

【形状・構造及び原理等】** *

[形状]

把柄部

ES：直径φ13.5mm（両端部）



XSi：直径φ11.5mm（両端部）



Si：直径φ8.5mm（両端部）



作業部

種類	左作業部	右作業部
LM 31-32		
27-29 LM 476-477		
1.5-2.5mm LM 471-473		
ダークダイヤモンド LM 31-32DD		
ダークダイヤモンド 1.5-2.5mm LM 471-473DD		

[種類]

LM 31-32 ES、XSi、Si

27-29 LM 476-477 ES、XSi、Si

1.5-2.5mm LM 471-473 ES、XSi、Si

ダークダイヤモンド LM 31-32DD ES

ダークダイヤモンド 1.5-2.5mm LM 471-473DD ES

【使用目的又は効果】

歯科充填用コンポジットレジンに歯に充填し、仕上げるために用います。

【使用方法等】

本品の先端に歯科充填用コンポジットレジンを取り、歯に圧接することにより充填を行います。また、本品の先端を充填した歯科充填用コンポジットレジンに軽く打ちつけることにより、充填材料を形成します。

【使用上の注意】*

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成26年10月31日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保守・点検に係る事項】** *

付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌パック等に入れてオートクレーブ滅菌（134℃-137℃、2bar、3分以上）を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者 白水貿易株式会社

電話番号 06-6396-4400

FAX番号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造業者 LM-Instruments Oy

製造国 フィンランド