

LM エキスカベータ

【形状・構造及び原理等】*

[形状]

把柄部

ES：直径φ13.5mm（両端部）



XSi：直径φ11.5mm（両端部）



Si：直径φ8.5mm（両端部）



作業部

種類	左作業部	右作業部
スプーンエキスカ 1.0mm LM 522-523		
スプーンエキスカ 1.5mm LM 533-534		
ラウンドエキスカ 1.0mm LM 61-62		
ラウンドエキスカ 1.5mm LM 63-64		
ラウンドエキスカ 2.0mm LM 65-66		
バックアクション エキスカ 1.0mm LM 611-621		
バックアクション エキスカ 1.5mm LM 631-641		
バックアクション エキスカ 2.0mm LM 651-661		
バックアクション エキスカ 3.5mm LM 671-681		
ルートカナル エキスカ 1.0mm LM 612-622		
ルートカナル エキスカ 1.5mm LM 632-642		
ルートカナル エキスカ 2.0mm LM 652-662		

[種類]

スプーンエキスカ 1.0mm LM 522-523 ES、XSi、Si

スプーンエキスカ 1.5mm LM 533-534 ES、XSi、Si

ラウンドエキスカ 1.0mm LM 61-62 ES、XSi、Si

ラウンドエキスカ 1.5mm LM 63-64 ES、XSi、Si

ラウンドエキスカ 2.0mm LM 65-66 ES、XSi、Si

バックアクションエキスカ 1.0mm LM 611-621 ES、XSi、Si

バックアクションエキスカ 1.5mm LM 631-641 ES、XSi、Si

バックアクションエキスカ 2.0mm LM 651-661 ES、XSi、Si

バックアクションエキスカ 3.5mm LM 671-681 ES、XSi、Si

ルートカナルエキスカ 1.0mm LM 612-622 ES、XSi、Si

ルートカナルエキスカ 1.5mm LM 632-642 ES、XSi、Si

ルートカナルエキスカ 2.0mm LM 652-662 ES、XSi、Si

【使用目的又は効果】

う歯の齶蝕象牙質の除去のために用います。

【使用方法等】

刃部を象牙質にあて、押圧により除去します。

【使用上の注意】*

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成26年10月31日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保守・点検に係る事項】** *

附着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌パック等に入れてオートクレーブ滅菌（134℃-137℃、2bar、3分以上）を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者 白水貿易株式会社

電話番号 06-6396-4400

FAX番号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造業者 LM-Instruments Oy

製造国 フィンランド