

LM ミラー

【形状・構造及び原理等】** *

[形状]

把柄部

XSi：直径φ11.5mm（両端部）



Si：直径φ8.5mm（両端部）



ESi：直径φ11.5mm（最大）



作業部

種類	左作業部	右作業部
LM 25 (XSi、Si)		
LM 25 (ESi)		
LM 28 (XSi)		
LM 28 (ESi)		
LM 25-26 (XSi)		
LM 25-473 (XSi)		

[種類]

LM 25 XSi、Si、ESi（色 レッド、グレー、ブルー）

LM 28 XSi、ESi（色 レッド、グレー、ブルー）

LM 25-26 XSi（色 ブルー）

LM 25-473 XSi（色 レッド）

【使用目的又は効果】

ミラーヘッド及びハンドルからなり、口腔内診査のために用います。

【使用方法等】*

本品の鏡面部に反射させることにより、目的の部位の診査を行います。

[右作業部の使用方法]

<25(XSi、Si)又は28(XSi)、及び25-26> 探針として用います。

<25-473> レジンの圧接のほか、インプラントドライバー後部に本作業部を入れドライバーを一時的に固定し、回しやすくするために用います（ドライバーの後部に穴の開いているドライバーのみ）。

【使用上の注意】*

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。（注意事項の内容例）

平成26年10月31日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保守・点検に係る事項】** *

付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌パック等に入れてオートクレーブ滅菌（134℃-137℃、2bar、3分以上）を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者 白水貿易株式会社

電話番号 06-6396-4400

FAX番号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造業者 LM-Instruments Oy

製造国 フィンランド