

機械器具 58 整形用機械器具  
歯科インプラント技工用器材 70757000  
一般医療機器

## レストアー コニカルアバットメント プラスチックスリーブ

### 【形状・構造及び原理等】

[形状]

種類	外観
SD/RD Hexed	
WD Hexed	
SD/RD Non-Hexed	
WD Non-Hexed	

[原理]

内部がアバットメントと正確に嵌合する形状を有する本品を、アバットメントに装着してワックスを築盛し補綴物を作製することにより、アバットメントと正確に適合する形状を補綴物に転写する。

### 【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

### 【使用方法等】

- 作業用模型上のアバットメントアナログに本品を装着する。
- 適切なサイズのファスニングスクリューを本品に貫通させてアバットメントアナログに挿入してヘクスドライバー（.048"）で締結し、本品をアバットメントアナログに固定する。
- ワックスアップを行う。必要に応じてラバーホイールで本品の上部をカットしてワックスを築盛し、アンダーカットの部分を除去します。この時、スクリューアクセスホールにワックスが陥入しないように注意する。
- ワックスアップ後、ファスニングスクリューの締結を緩めて撤去し、ワックスアップしたフレームをアナログから取り外す。
- フレームの掘り出し後、鑄造時に出来た微小なバリ等はアナログに装着する前にラバーホイールで除去する。
- 模型上のアナログにフレームを装着して適合を確認し、通法に従い、フレームを仕上げる。
- 作製したフレームをもとに、補綴物を作製する。

[使用方法に関する使用上の注意]

必ずアバットメントのサイズに対応した本品を選択すること。

### 【使用上の注意】\*

[使用注意]

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*

製造販売業者：白水貿易株式会社

電話番号：06-6396-4400

FAX 番号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造国：アメリカ合衆国

製造業者：Keystone Dental, Inc.

取扱説明書を必ずご参照ください