

機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント技工用器材 70757000
一般医療機器

Oリングアバットメント アナログ

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕



〔成分〕

ステンレス鋼

〔原理〕

本品は、Oリングアバットメントと同一の形状を先端に有しており、口腔内のアバットメントの形状と位置を作業用模型上に正確に再現する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

1. ヒーリングアバットメントをインプラントから撤去し、Oリングアバットメントをインプラントに装着する。
2. Oリングアバットメントの周辺に印象材を塗布し、全顎印象を採得する。
3. 印象材硬化後、印象を口腔内から撤去する。
4. 印象の精度を確認後、本品を印象に装着し、石膏を注入して模型を作製する。
5. プロセッシング Oリングを装填した Oリングキーパーを本品に装着する。
6. Oリングキーパーと本品の界面及び Oリングキーパー上端をブロックアウトする。
7. 通法に従って、義歯床に Oリングキーパーを組み込む。

【使用上の注意】＊

〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊

製造販売業者：白水貿易株式会社

電 話 番 号：06-6396-4400

F A X 番 号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製 造 国：アメリカ合衆国

製 造 業 者：Keystone Dental, Inc.

取扱説明書を必ずご参照ください