

\*\*2021年2月改訂（第3版）

届出番号：27B1X00020221069


\*2016年7月改訂（第2版）（新記載要領に基づく改訂） 機械器具 32 医療用吸引器  
再使用可能な汎用吸引チップ 38749000  
一般医療機器

## LM マルチセプター

### 【形状・構造及び原理等】\*

[概要]

本品はシリコン製のチューブ及び金属製の針金である。

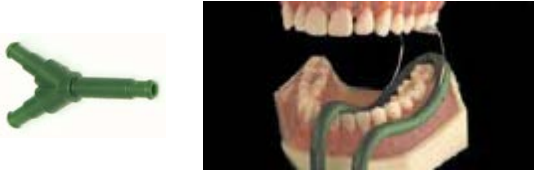

[構成部品]

シリコンチューブ（40cm又は50cm）  
保持スプリング  
Y字コネクタ  
コネクションチューブ（大及び小）

### 【使用目的又は効果】

歯科用ユニット等の能動型吸引装置へ接続し、口腔内の唾液等の除去に用います。

### 【使用方法等】

1. シリコンチューブに保持スプリング、Y字コネクタ及びコネクションチューブを接続します。
2. Y字コネクタを排唾ユニットに接続します。
3. チューブを口腔内の形状に合わせて手で変形し、口腔内に装着します。
4. 排唾ユニットを添付文書に従って起動し、唾液等を吸引します。

### 【使用上の注意】\*

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成26年10月31日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

### 【保守・点検に係る事項】\*\* \*

使用後は各構成部品を取り外し、洗浄・滅菌すること。

[滅菌方法]

シリコンチューブ、保持スプリング：

付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バック等に入れてオートクレーブ滅菌(134°C-137°C、2bar、3分以上)を行う。

Y字コネクタ、コネクションチューブ：

UV滅菌等の冷滅菌を行う。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*

製造販売業者 白水貿易株式会社

電話番号 06-6396-4400

FAX番号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造業者 LM-Instruments Oy

製造国 フィンランド