

機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント技工用器材 70757000
一般医療機器

レストアー スタンダード／コニカル ワックスピン

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕



種類：スタンダード／コニカルアバットメント用 SD/RD、
コニカルアバットメント用 WD

〔成分〕

チタン合金

〔原理〕

本品は、作業用模型上のアバットメントアナログに補綴物の基部となるスリーブを固定し、ワックスアップ時にワックスを支持して補綴物のスクリーアクセスホールを設計するために使用するスクリューである。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

1. 適切なスリーブを選択し、作業用模型上のアバットメントアナログに装着する。
2. 本品をスリーブに貫通させてアバットメントアナログに挿入して適切なドライバーを用いて締結し、スリーブをアバットメントアナログに対して固定する。
3. 通法にしたがって、フレームのワックスアップを行う。この際、本品の周囲にチムニーをワックスアップする。
4. ワックスアップ完了後、本品をドライバーで撤去してフレームをアバットメントアナログから取り外す。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

本品を締結する際は、所定の器具を用いること。

【使用上の注意】＊

〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊

製造販売業者：白水貿易株式会社

電 話 番 号：06-6396-4400

F A X 番 号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製 造 国：アメリカ合衆国

製 造 業 者：Keystone Dental, Inc.

取扱説明書を必ずご参照ください